

Sinnvolles Zubehör für Ella

An Ella können Sie verschiedene Taster und Sensoren mit 3,5 mm Klinenstecker anschließen.

Einige basale Sprachhilfsmittel verfügen über eine Buchse zum Ansteuern von batteriebetriebenen Kleingeräten, z.B. Little Step by Step, Big Step by Step, Little Mack, Big Mack.

Ein besonders einfaches Hilfsmittel für längeres Einschalten ist MiLa von Tfb Rehalösungen. Sie brauchen MiLa nur zwischen Taster und Laterne anzuschließen, und schon können Sie die Laterne auch dauerhaft leuchten lassen.

Mit dem praktischen Laternenhalter können Sie Ella unter anderem an Rollstuhltischen oder Armlehnen befestigen.

Das genannte Zubehör erhalten Sie in unserem Webshop unter www.tfb-team.de.

Maße

Länge Laternenstab: ca. 52 cm
Länge Anschlussleitung: ca. 37 cm
Länge Glühlampenkabel: ca. 20 cm

Batteriewechsel

Um die Batterien (2 Mignon) zu wechseln, drehen Sie den Griff des Haltestabs ab. Altbatterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt, sondern müssen einer Sammelstelle zugeführt werden (Recyclinghöfe).




TfB Rehalösungen GmbH

Hildesheimer Str. 154a 30880 Laatzen
Tel.: 0511/ 82 83 00 Fax: 0511/ 82 83 06
info@tfb-team.de www.tfb-team.de



Bedienlektüre

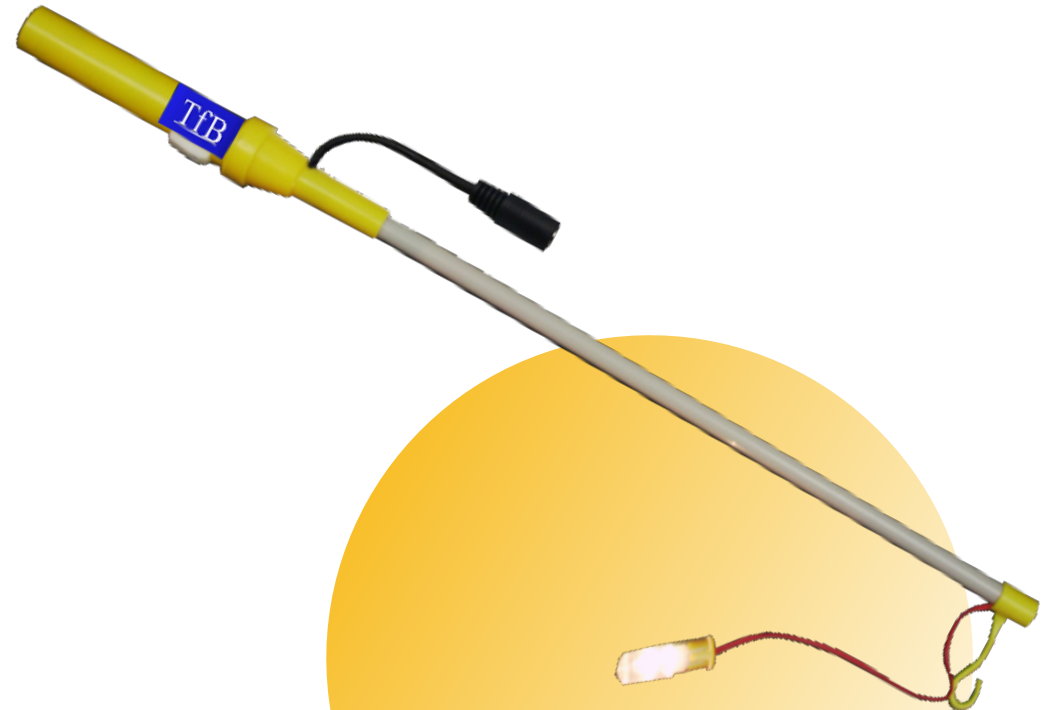

**Ella -
Elektrischer
Laternenstab**



Ella - Elektrischer Laternenstab

Für wen ist Ella geeignet?

Wir haben Ella entwickelt für Menschen, die auf Grund körperlicher Beeinträchtigungen keine herkömmlichen Laternenstäbe halten und die Schiebeschalter nicht betätigen können. Ella ist einsetzbar bei spielerischem Lernen und basaler Therapie. Ella trägt zum Erwerb des Aktions- und Reaktionsverständnisses bei.

Wie funktioniert Ella?

Ella ist ein elektrischer Laternenstab, der mit einem zusätzlichen Anschluss für externe Taster, Sensoren oder Hilfsmittel ausgestattet ist. Wenn ein angeschlossener Taster betätigt wird, leuchtet die Glühlampe auf. Soll die Laterne länger leuchten, muss der Taster entsprechend länger gedrückt oder ein nachfolgend beschriebenes Hilfsmittel verwendet werden.



Bitte beachten!
Sie benötigen einen Taster oder ein anderes Hilfsmittel zum Ansteuern von Ella.

Inbetriebnahme

Schalten Sie Ella ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter am Griff des Laternenstabes nach vorne schieben (siehe Bild rechts, Nr. 1). Am Haltegriff von Ella ist eine Anschlussleitung angebracht. Verbinden Sie einen Taster, der über einen 3,5 mm Klinkenstecker verfügt, mit der Buchse der Anschlussleitung (Nr. 2). An den Haken an der Spitze des Laternenstabes können Sie eine Laterne hängen. Die Glühlampe hängen Sie in die Laterne.

Tipps

Basteln Sie mit unserer adaptierten elektrischen Schere in Partnerarbeit zuerst Ihre Laterne!

Bedienung

- mit einem Taster:
Ein Druck auf den Taster (Nr. 3a) bringt die Laterne zum Leuchten. Hört der Druck auf, erlischt die Lampe.

- mit einem Sprachhilfsmittel:
Einige basale Sprachhilfsmittel haben bereits eine Buchse zum Ansteuern von batteriebetriebenen Kleingeräten eingebaut (Nr. 3b). Verbinden Sie die beiden Geräte mit einem Adapterkabel mit beidseitigen Steckern. Das Sprachhilfsmittel können Sie so einstellen, dass die Laterne für die Dauer der Mitteilung leuchtet. Ein Laternenlied als Mitteilung aufzusingen ist besonders wirkungsvoll – die Laterne leuchtet, solange das Lied erklingt.

- mit MiLa:
MiLa macht aus dem Taster einen Schalter. Sie schließen MiLa (Nr. 3c) zwischen den Taster (MiLa, Eingangsbuchse) und die Laterne (MiLa, Ausgangsbuchse). Sie brauchen nichts einzustellen. Mit einem ersten Tastendruck schaltet MiLa die Laterne ein. Sie bleibt an, auch wenn der Taster wieder losgelassen wird. Ein zweiter Tastendruck, und die Laterne erlischt.

Vergessen Sie nicht, Ella nach Gebrauch wieder auszuschalten. Dazu schieben Sie den Ein-/Ausschalter am Griff wieder zurück (Nr. 1).

Lieferumfang

- Diese Bedienlektüre
- Ella - elektrischer Laternenstab inkl. Buchse für Klinkenstecker (3,5 mm)
- 2 Batterien

Laternenhalter

Ein nützliches Zusatzteil, das Sie in unserem Webshop bestellen können, ist die Halterung für Ella (Nr. 4): Sie kann beispielsweise an Tischplatten oder Armlehnen von Rollstühlen befestigt werden.

Sie finden eine große Auswahl an Kommunikationshilfsmitteln und Zubehör auf unserer Homepage: www.tfb-team.de

1

Vor Gebrauch wird der Ein-/Ausschalter nach vorne geschoben (eingeschaltet).



Aus
Ein

2

Der Klinkenstecker eines Tasters wird in die Buchse (3,5 mm) der Anschlussleitung gesteckt.



4

Mit einer Klemme wird der Halter am Tisch oder an der Rollstuhlarmlehne befestigt.

3a

Solange der Taster gedrückt wird, leuchtet die Glühlampe.



3b


Ella leuchtet, solange die Mitteilung ertönt. (zum Beispiel mit dem Little Step by Step, Anschluss über Adapterkabel).



3c

Besonders einfach ist der Einsatz von MiLa. Mit dem ersten Tastendruck schaltet MiLa die Laterne ein. Ein zweiter Tastendruck lässt die Laterne erlöschen.

vom Taster

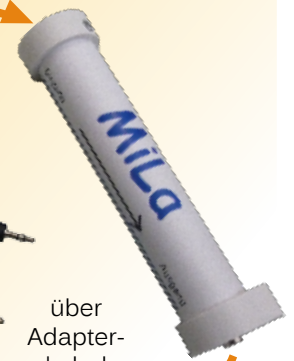

über Adapterkabel zu Ella