

Zubehör

Sie können verschiedene Taster und Sensoren mit 3,5mm Klinenstecker anschließen, wenn der eingebaute Taster nicht bedient werden kann.

Auf unserer Homepage finden Sie Taster unterschiedlicher Formen, Farben, Größen und Auslösearten, sowie viele adaptierte Spielzeuge und Kleingeräte.



Übernimmt die Krankenkasse die Kosten für Step by Steps?

Kommunikationshilfsmittel sind Hilfsmittel nach dem gesetzlichen Hilfsmittelkatalog (Gruppe 16, Kommunikationshilfsmittel) und gehören grundsätzlich in den Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenkassen.



Wie beantrage ich Step by Steps bei der Krankenkasse?

Gerne übernehmen wir die Beantragung für Sie. Wir benötigen dazu ein Rezept Ihres Arztes (z. B. Hausarzt, Neurologe, HNO-Arzt, Kinderarzt). Darauf sollte stehen: „Kommunikationshilfsmittel BIG oder LITTLE Step by Step mit behindertengerechtem Zubehör wegen ... (Diagnose)“. Eine pädagogische oder therapeutische Stellungnahme (Ergo-, Physio- oder Logopädie) ist meist notwendig.

Hinweis für den Arzt

Hilfsmittel sind sächliche medizinische Leistungen.
Für sie gibt es **keine Richtgrößen** und damit auch **keine Budgetierung**.

Technische Daten

Betrieb mit einer 9V Blockbatterie.
Anschluss für externe Taster / Sensoren oder Kleingeräte und Spielzeug mit 3,5 mm Klinenstecker.

Altbatterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt, sondern müssen einer Sammelstelle zugeführt werden (Recyclinghöfe, Batteriesammlungen im Einzelhandel o.ä.).



Bedienlektüre



BIG step by step
LITTLE step by step
mit und ohne Ebenen



TfB Rehalösungen GmbH

Weinsheimer Straße 57a

67547 Worms

Tel.: 06241 49691 75 Fax: 06241 49691 69

info@tfb-team.de www.tfb-team.de



BIG- und LITTLE Step by Step

mit und ohne Ebenen

Funktionsumfang:

Den BIG- und LITTLE Step by Step gibt es mit (with Level) oder ohne Ebenen. Es ist eine sehr einfache Kommunikationshilfe mit Sprachausgabe.

- Auf dem BIG / LITTLE Step-by-Step können beliebig viele Mitteilungen mit einer Gesamtlänge (alle Mitteilungen zusammen) von 2 Minuten gespeichert werden.
- Die Version „with Level“ hat 3 Ebenen. Auf jeder Ebene können beliebig viele Mitteilungen mit einer Gesamtlänge von 4 Minuten gespeichert werden.

BIG- und LITTLE-Versionen unterscheiden sich lediglich durch ihr Gehäuse und die Größe des Auslösetasters.

Für wen ist ein Step by Step geeignet?

Der Step by Step ist geeignet für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die ohne oder mit eingeschränkter Lautsprache kommunizieren und lediglich ein sehr basales Hilfsmittel nutzen können, z. B. bei schweren geistigen Behinderungen oder in der ersten Phase der Sprachanbahnung. Für Nutzer von komplexeren Kommunikationshilfsmitteln kann es eine sinnvolle Ergänzung sein, um z.B. schneller auf sich aufmerksam zu machen.

Autisten kann die Kommunikationsaufnahme erleichtert werden.

Für Menschen mit schweren motorischen oder visuellen Einschränkungen ist die BIG-Version durch seine große Taste oft einfacher zu bedienen als die LITTLE-Version.

Für welche Zwecke ist der BIGmack / LITTLEmack geeignet?

Er ist gut geeignet, um erste Kommunikationserfahrungen zu machen. So eignet er sich für:

- den Erwerb des Aktions-Reaktions-Verständnisses: Ich tue etwas (Betätigung der Taste) => Es passiert etwas (Mitteilung, Lied, Geräusch)

- den Erwerb des erweiterten Aktions-Reaktions-Verständnisses: Ich tue etwas (Betätigung der Taste) => Es passiert etwas (Mitteilung) => Zusätzlich bekomme ich eine zur Mitteilung passende Reaktion von anderen Personen
- das Erlernen, wie man Sprache gezielt einsetzt, um Bedürfnisse zu äußern
- das Erlernen von Aufmerksamkeit
- die Teilhabe an Situationen, in denen eine einzelne Aussage sinnvoll eingesetzt werden kann.

Beispiele für den Einsatz des Step by Step

- Morgenkreis (Erzählen von Erlebnissen, Begrüßung von Mitschülern)
- kurze Dialoge, die der Nutzer durch Fragen und Floskeln selbst lenkt: Kreide holen inkl. Begrüßung und Verabschiedung
- der Spruch oder Witz des Tages
- eine kleine Geschichte / ein Lied in Absätzen bzw. Strophen
- Beteiligung an Spielen durch das Geben des Kommandos z.B. „Achtung – Fertig – Los!“

Am TOY-Anschluss kann ein adaptiertes Kleingerät angeschlossen werden. Dies wird so lange eingeschaltet, wie eine **ausgewählte** Mitteilung abgespielt wird. Von den Mitteilungen aktivieren diejenigen das Kleingerät, bei denen während des Aufnehmens noch einmal kurz die Record-Taste gedrückt wird.

Lieferumfang

- Diese Bedienlektüre
- BIG Step by Step **oder** LITTLE Step by Step
- Vier Tastenkappen rot, grün, gelb, blau
- Ein 3,5 Klinken-Verbindungskabel
- Eine 9V Blockbatterie

1 = Taster und adaptierte Kleingeräte sind nicht im Lieferumfang enthalten, Sie finden eine große Auswahl auf unserer Homepage: www.tfb-team.de

Rote LED zeigt Aufnahme-Modus

Externe Taster / Sensoren

RECORD = Aufnahme – Taste

leiser Aus **Klick** lauter Ein

Anschluss für Zusatzgeräte

Wahlschalter für die Ebenen (je nach Modell)

Mikrofon

Mitteilungstaste

Es müssen alle gewünschten Mitteilungen hintereinander aufgezeichnet werden. Daher empfiehlt es sich, diese vor der Aufnahme zu notieren. Sobald Sie Schritt 9. ausgeführt haben und einen neuen Aufnahmevorgang beginnen (wieder ab Schritt 4.) löschen Sie automatisch alle vorher gespeicherten Mitteilungen.

Wie nehme ich eine Mitteilung auf?

1. Schalten Sie den Step-by-Step ein.
2. Beim Step-by-Step mit Ebenen wählen Sie die gewünschte Ebene.
3. Drücken Sie die RECORD-Taste auf der Rückseite, bis die rote LED aufleuchtet.
4. Lassen Sie die RECORD – Taste los.
5. Drücken Sie die Mitteilungstaste und halten Sie diese gedrückt. Die rote LED blinkt.
6. Sprechen Sie mit deutlicher Stimme die gewünschte Mitteilung. Halten Sie beim Sprechen einen Abstand von ca. 20 cm vom Mikrofon.
7. Lassen Sie die Mitteilungstaste los. Die rote LED leuchtet wieder dauerhaft.
8. Wiederholen Sie Schritt 5. – 7. zum Aufnehmen weiterer Mitteilungen.
9. Drücken Sie erneut die RECORD-Taste. Die rote LED erlischt. Die Nachrichten sind gespeichert.

Wie rufe ich die Mitteilung ab?

Die Mitteilungen werden durch Drücken der Mitteilungstaste abgerufen. Jedes erneute Drücken ruft die nächste gespeicherte Aussage ab. Wird nach Wiedergabe der letzten gespeicherten Aussage erneut die Mitteilungstaste gedrückt, beginnt das Gerät wieder mit der ersten gespeicherten Aussage.

Wie lösche ich die Mitteilung?

Mitteilungen werden gelöscht, indem sie durch eine neue Mitteilung überspielt werden. Gehen Sie vor wie beim Aufnehmen einer Mitteilung (Schritt 1. – 9.), nehmen Sie einfach einige Sekunden Stille auf. Eine einzige solche Sequenz reicht aus, um alle aufgenommenen Aussagen zu überspielen.