

### Welches Zubehör wird benötigt?

An den Dosenöffner können Sie verschiedene Taster und Sensoren mit 3,5mm Klinkenstecker anschließen. Auf unserer Homepage finden Sie eine Auswahl unterschiedlicher Formen, Farben, Größen und Auslösearten.



### Batteriewechsel

Lässt die Leistung des Dosenöffners nach, sollten Sie die Batterien gegen neue austauschen (*Bild 5+6 Innenseite*). Altbatterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt, sondern müssen einer Sammelstelle zugeführt werden (Recyclinghöfe, Batteriesammlungen im Einzelhandel o.ä.)

Anmerkung: Es können grundsätzlich auch wiederaufladbare Akkus verwendet werden. Da diese jedoch eine geringere Kapazität und Spannung haben als Batterien, verringert sich die Leistung und Laufzeit des Gerätes.



### Technische Daten

Betrieb mit 2 Mignon-Batterien (Größe AA) oder entsprechende Akkus (siehe Anmerkung im Abschnitt „Batteriewechsel“)  
Ein externer Sensor muss für mindestens 6 Volt 500 mA Gleichspannung ausgelegt und mit einem 3,5 mm Klinkenstecker versehen sein.



**TfB Rehalösungen GmbH**

Weinsheimer Straße 57a

67547 Worms

Tel.: 06241 49691 75 Fax: 06241 49691 69

info@tfb-team.de

www.tfb-team.de

TfB

# Bedienlektüre



**Dosenöffner**

TfB

## Dosenöffner

### Einsatz des Dosenöffners

Er wird dort eingesetzt, wo ein herkömmlicher Dosenöffner aus Sicherheitsgründen oder wegen motorischer Schwierigkeiten nicht genutzt werden kann. Durch eigenes Handeln sollen die individuellen Fähigkeiten und die Selbstständigkeit gesteigert, sowie das Selbstwertgefühl gefördert werden. Solange die motorischen Fähigkeiten zur Führung und Bedienung ausreichend sind, kann er allein durch Drücken des grünen Tasters aktiviert werden (Bild 3). Wird ein Partner (Betreuer) zur Führung des Öffners benötigt, kann er durch einen externen Taster / Sensor vom eigentlichen Nutzer aktiviert werden.

### Partnerarbeit mit dem Öffner

Gerade bei schweren motorischen Schwierigkeiten kann der Öffner sehr sinnvoll eingesetzt werden. Betreuer sollen nur den manuellen Part übernehmen, z.B. den Öffner auf die Dose aufsetzen, und sind somit lediglich ausführend tätig. Die eigentlichen Nutzer können mit Taster / Sensoren den Öffnungsvorgang selbständig in Gang setzen. Besonders bei Nutzern, die selbst bei den kleinsten Handlungen auf Hilfe angewiesen sind, wird so das eigene Handeln gefördert.

Es versetzt die Nutzer zudem in die Lage über ihre aktive Mitarbeit oder eben auch über eine Verweigerung selbständig zu entscheiden. So nehmen Nutzer eigenverantwortlich am Herstellungsprozess teil und können ihre Eigenleistung im Endprodukt wiederfinden.

Somit ist eine Identifikation mit der Arbeit möglich.

### Wie wird der Dosenöffner bedient?

Der Dosenöffner wird so auf eine Dose platziert, dass der Dosenrand zwischen Schneidrad und gezacktem Antriebsrad

liegt (Bild 1 + 2). Durch das Betätigen eines extern angeschlossenen Tasters (oder des eingebauten grünen Tasters) wird das Öffnen gestartet, das Schneidrad zieht sich in den Dosenrand. Sobald der Schneidprozess begonnen hat, muss der Taster nicht mehr betätigt werden. Der Dosenöffner bewegt sich für 20 Sekunden am Dosenrand entlang und stoppt automatisch.

### Zu Ihrer Sicherheit

Der Sicherheitsschalter (Bild 2) muss durch den Dosenrand betätigt werden, sonst arbeitet der Dosenöffner nicht. Versuchen Sie nicht den Sicherheitskontakt mit dem Finger zu betätigen, Sie könnten zwischen Schneid- und Antriebsrad kommen und sich Verletzungen zuziehen!

### Rückwärtsgang

Sollte ein Rückwärtslaufen des Öffners notwendig sein, drücken Sie bitte den schwarzen Stift (Bild 4).

### Batteriewechsel

Auf beide Seiten der „U“-förmigen Gehäuseschale drücken und nach hinten abziehen (Bild 5 - 7). Bitte achten Sie auf die Polarität der Batterien. Falsch eingelegt können die Batterien selber und das Gerät beschädigt oder zerstört werden.

### Reinigung

Nachdem Sie die Batterieabdeckung entfernt haben, können Sie auch die Abdeckung des Schneidmessers nach vorne herausziehen (Bild 7). Den Dosenöffner nicht in Wasser tauchen! Benutzen Sie einen feuchten Lappen.

### Lieferumfang

- Diese Bedienlektüre
- Elektrischer Dosenöffner
- Zwei Mignon Batterien

Taster, Batterieunterbrecher und adaptierte Geräte sind nicht im Lieferumfang enthalten, Sie finden eine große Auswahl auf unserer Homepage: [www.tfb-team.de](http://www.tfb-team.de)

