

Welches Zubehör wird benötigt?

Am Trio können Sie verschiedene Taster und Sensoren mit 3,5 mm Klinkenstecker anschließen. Auf unserer Homepage finden Sie dazu eine Auswahl unterschiedlicher Formen, Farben, Größen und Auslösearten.



Welche Software kann man nutzen?

Sie können jede Software benutzen, die über herkömmliche Maustasten gesteuert wird.

Im Scanning-Modus steuern Sie z.B.:

- Kommunikationssoftware wie MindExpress
- Bildschirmtastaturen wie KeyVit mit Multitext
- Therapie- und Lernsoftware insbesondere von Lifetool



Informationen zu den Programmen finden Sie auf unserer Homepage.

Technische Daten

Betriebssysteme:
Windows XP / Vista / 7 / 8

Externe Taster oder Sensoren:
Anschluss über 3,5 mm Klinkenstecker,
Moment-Schließer, Schaltleistung
24 V / 50 mA, potentialfrei

Stromversorgung:
Trio-USB, Versorgung über den PC

Trio-Funk, 2 x Batterien Typ Mignon, AA
Bitte keine Akkus verwenden.



Batterien bitte ordnungsgemäß entsorgen,
nicht in den Hausmüll geben!

Hinweis zu Markennamen

Lifetool und Windows sind Produkte der jeweiligen Hersteller und werden hier nur zur Dokumentation verwendet!



TfB Rehalösungen GmbH

Weinsheimer Straße 57a

67547 Worms

Tel.: 06241 49691 75 Fax: 06241 49691 69

info@tfb-team.de www.tfb-team.de



Bedienlektüre



Trio
Maustastensimulator



Trio

Funktion des Trios

Einige Programme können allein durch Maustasten gesteuert werden. Wer Maustasten nicht oder nicht sicher auslösen kann, benutzt statt dessen den Trio und individuell ausgesuchte Taster. Der Trio simuliert Ihrem PC die Tasten einer ganz normale PC-Maus.

Anwendung des Trios

Herkömmliche Maustastensimulatoren können nur die linke und rechte Maustaste ersetzen. An den Trio kann noch eine dritte Taste angeschlossen werden, die das Scrollrad bzw. die mittlere Maustaste simuliert (Bild 1).

Mit der dritten Taste lassen sich bei einer Reihe von Programmen weitere Funktionen steuern. So verwendet zum Beispiel Lifetool die dritte Taste in vielen Lern- und Therapieprogrammen.

Sie wird beim Scanning eingesetzt, um den Nutzern ein selbstständiges Wiederholen von Übungen zu ermöglichen.

Selbstverständlich kann der Trio parallel zu anderen USB-Geräten betrieben werden.

Trio-Funk ideal für Rollstuhlfahrer

Der Trio-Funk ist besonders geeignet, wenn jemand mit etwas Abstand vor dem PC sitzt oder aber selbständig mit dem Rollstuhl an den PC heran und wieder wegfährt, wobei die Taster und der Trio-Funk auf dem Rollstuhl verbleiben können.

Lieferumfang

- Diese Bedienlektüre
- Trio-USB (mit Kabelanschluss) oder
- Trio-Funk

Zusätzlich beim Trio Funk:

- Ein Funk-Empfänger in Form eines Mini-USB-Sticks (Bild 2), er befindet sich bei Auslieferung im Batteriefach!
- Zwei Mignon-Batterien

Hinweise zum Betrieb des Geräts

Trio-USB und Trio-Funk werden beim Einstecken in den PC selbständig erkannt (Bild 2, 3 u. 4). Sollte Ihr Trio nicht wunschgemäß reagieren, versuchen Sie bitte einen anderen USB-Anschluss Ihres Rechners.

Probieren Sie den Trio in einem anderen Programm und vergleichen Sie die Reaktion durch Klicken mit Ihrer herkömmlichen Maus.

Der Trio-Funk ist mit einer automatischen Abschaltung ausgestattet. Nach einer Pause „wecken“ Sie ihn durch Betätigen eines beliebigen Tasters. Danach reagieren die angeschlossenen Tasten wie die entsprechenden Maustasten.

Sollte ein Taster nicht funktionieren, testen Sie ihn an einer anderen Trio-Buchse.

Beachten Sie bitte, dass die Stecker von einigen Tastern etwas mehr Druck benötigen, bis sie ganz eingerastet sind!

Batteriewechsel beim Trio - Funk

Wenn das Gerät nicht mehr zuverlässig arbeitet, kann das an schwachen Batterien liegen. Tauschen Sie daher immer beide Batterien gleichzeitig gegen neue Batterien aus. Achten Sie auf gleiche Angaben bei Fabrikat, Typ und Haltbarkeit. Wir empfehlen Batterien von Markenherstellern zu verwenden, um das Risiko von Gerätestörungen, z.B. durch das Auslaufen der Batterien, zu minimieren.

Tauschen Sie die Batterien mindestens einmal jährlich aus.

Bitte keine Akkus verwenden, da hiermit die Funktionsfähigkeit nicht gewährleistet ist!


1 = Taster und Software sind nicht im Lieferumfang enthalten, Sie finden eine große Auswahl auf unserer Homepage: www.tfb-team.de



Verwenden Sie bitte Taster mit 3,5 mm Klinkenstecker.



Den **Trio - USB** können Sie mit dem USB-Kabel an Ihren PC anschließen.

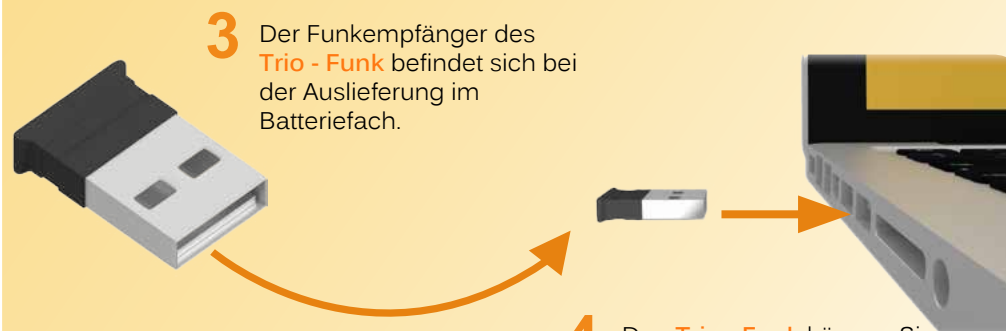

3 Der Funkempfänger des **Trio - Funk** befindet sich bei der Auslieferung im Batteriefach.

4 Den **Trio - Funk** können Sie über den Funk -Empfänger mit Ihrem PC verbinden.



Beide Trio - Versionen werden automatisch von Ihrem PC erkannt.